



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Badenwannensitz

Fiona

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



Caremax
Easy life, keep moving

unizell

Freiheit
durch
Sicherheit



Badewannensitz

Fiona

1. Einleitung	3
2. Produktbeschreibung	3
3. Anwendungshinweise	3
4. Indikation	3
5. Kontraindikation	3
6. Sicherheit	4
7. Garantieinformationen	4
8. Konformität	4
9. Lieferumfang	4
10. Reinigungs- / Desinfektionshinweise	4
11. Wiedereinsatz	5
12. Wartungshinweise	5
13. Montageanleitung	5
14. Technische Daten	7
15. Symbole am Produkt	8



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



1. Einleitung

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten.

Sollten Sie die gedruckte Version aufgrund der Schriftgröße nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit sich dieses Dokument als PDF-Version auf unserer Homepage www.unizell.de/downloads herunterzuladen. Das PDF-Dokument können Sie entsprechend der benötigten Größe auf dem Bildschirm vergrößern. Auf Anfrage erhalten Sie ein geschütztes Word-Dokument, um die Vorlese-Funktion bei MS Office nutzen zu können.

2. Produktbeschreibung

Fiona ist ein Badewannensitz mit vier rutschfesten Füßen und einem leicht zu reinigenden Kunststoffsitz. Die Füße dienen hierbei als sichere Auflage auf dem Wannenrand. Das Produkt kann durch wenige Handgriffe montiert werden und passt in alle gängigen Wannenbreiten (ca. 73,5 - 83,5 cm) durch eine 4-fache Breitenverstellung.

3. Anwendungshinweise

Dieser Badewannensitz ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

Bitte reinigen Sie das Produkt gründlich vor der ersten Nutzung. Beachten Sie hierzu bitte die Reinigungs- und Desinfektionshinweise im Kapitel 10.

4. Indikation

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (z. B.: Beine und/oder Hüften) oder Gleichgewichtsproblemen beim Aufstehen oder Gehen aufgrund vorübergehender oder dauerhafter Behinderungen.

5. Kontraindikation

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produktes und unter Beachtung der Anwendungshinweise sind keine Gegenanzeigen bekannt.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



6. Sicherheit

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Badewannensitzes keine Gefahr aus.

- Verwenden Sie den Badewannensitz nur in technisch einwandfreiem Zustand!
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Federstifte der 4 Auflagen fest eingerastet sind.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den einwandfreien Zustand der Auflagen. Defekte Auflagen sollten nicht mehr verwendet werden, da die Rutschfestigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann!
- Prüfen Sie vor Gebrauch, dass eine gleichmäßige Breite der 4 Auflagen eingestellt ist. Achten Sie darauf, dass immer alle 4 Auflagen einwandfrei auf dem Wannenrand aufliegen!
- Bei der Nutzung des Badewannensitzes NICHT zu stark nach vorne oder hinten lehnen, während Sie auf dem Badewannensitz sitzen, um ein Kippen zu vermeiden!
- Bitte beachten Sie, dass Rutschgefahr beim Hinsetzen und Aufstehen in nassen Badewannen besteht, insbesondere, wenn Sie Badezusätze oder Seifen verwenden!
- Es ist untersagt Veränderungen an dem Badewannensitz vorzunehmen!
- Es ist verboten mit den Füßen auf das Produkt zu steigen!
Kinder dürfen den Badewannensitz wegen Kippgefahr nicht unbeaufsichtigt anwenden!

7. Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land. Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch:

- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- falsche Verwendung und Handhabung
- normalem Verschleiß
- falscher Montage oder Einrichtung durch den Käufer oder einen Dritten
- technischen Änderungen
- unbefugten Änderungen bzw. Einsatz nicht geeigneter Ersatzteile

8. Konformität

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte

9. Lieferumfang

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln, oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Fachhandel in Verbindung. Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 PE-Sitz
- 4 Beinrohre (2x links, 2x rechts)
- 4 Sicherungsclips
- 1 Gebrauchsanweisung

10. Reinigungs- / Desinfektionshinweise

Für die Reinigung ist ein milder Haushaltsreiniger zu verwenden. Eine anschließende Desinfektion muss mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel durchgeführt werden.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



Caremax
Easy life, keep moving

unizell

Freiheit
durch
Sicherheit

11. Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für die wiederholte Verwendung geeignet.

Vor jedem Wiedereinsatz ist die Einstiegshilfe einer kompletten Prüfung zu unterziehen. Eine Reinigung und Desinfektion (siehe Punkt 10) ist durchzuführen.

Die zu erwartende Lebensdauer der Einstiegshilfe beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Sicherheits- und Pflegehinweise bis zu 5 Jahre.

Das Produkt darf nicht wiederholt verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen vorliegen.

12. Wartungshinweise

Für den Badewannensitz ist keine Wartung erforderlich, wenn die oben aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen beachtet werden. Der Badewannensitz ist durch die Verwendung von nicht rostenden Metallen und Kunststoffteilen im Nassbereich einsetzbar.

13. Montage

Der Badewannensitz wird mit dem mitgelieferten Montagematerial entsprechend der Montageanleitung zusammgebaut und gesichert. Weiteres Werkzeug ist nicht erforderlich.

Abb. 1: Nehmen Sie als erstes den Kunststoffstift und drehen Sie diesen um, sodass Sie die Rohre unter dem Sitz sehen.


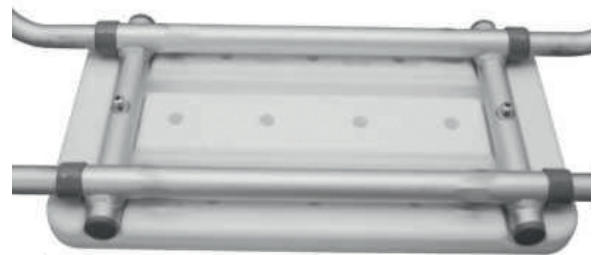


Abb. 2: Stecken Sie die 4 Beinrohre in die Sitzrohre. Schauen Sie hierbei nach der für Sie notwendigen Einstellung für die Wannenbreite. Hierfür haben Sie auf jeder Seite 2 Einstellmöglichkeiten.

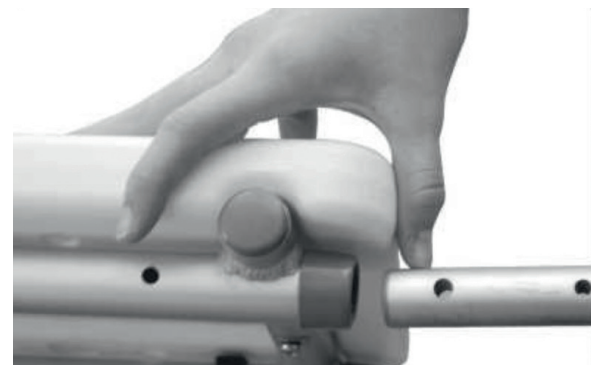

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



Caremax
Easy life, keep moving

unizell

Freiheit
durch
Sicherheit

Abb. 3: Achten Sie hierbei auf die korrekte Auswahl der Beine. Durch unterschiedlichen Bohrungen erhält der Badewannensitz die notwendige, gespreizte Form um sicher auf dem Wannenrand aufzuliegen.



Abb. 4: Sichern sie die Beinrohre in den Sitzrohren mit den 4 mitgelieferten Sicherungsclips.



Abb. 5: Ihr Badewannensitz ist nun fertig montiert und kann auf dem Wannenrand platziert werden.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

Badewannensitz

Fiona

PZN 17941103 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: D/112022)



Caremax
Easy life, keep moving

unizell

Freiheit
durch
Sicherheit











14. Technische Daten

Abmessungen in cm	
Sitzbreite	42
Sitztiefe	23
Gesamtlänge	73,5 - 83,5
Gesamthöhe	18
Breitenverstellung	10
Gewicht in kg	
Produktgewicht	1,5
Max. Benutzergewicht	135
Materialien	
Gestell	Aluminiumlegierung
Sitz	PE
Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur	5°C - >40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	25% - 95%
Transport- und Lagerungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	5°C - >40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	25% - 95%



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Geht das Produkt in einen anderen Besitz über, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung mit. Stand 11/22

15. Symbole am Produkt

	Hersteller		Produktionsdatum
	zuständiger EU-Repräsentant		Importeur
	Medizinprodukt		CE-Kennzeichnung
	Belastbarkeit		Gebrauchsanweisung lesen
	Chargennummer		Artikelnummer

Hersteller: Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China

EC-Rep: SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Importeur: unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

CH-Rep: forma-complete GmbH
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240

Importeur: Praximedico AG
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland

